

CLEVER FILL PDA

voor efficiënter robot gebruik

De Clever Fill PDA (Personal Digital Assistent, ook wel handheld computer genoemd) is ontwikkeld in Nederland door RoboPharma samen met een aantal leden van de gebruikersvereniging en regionale sales partners.



De Clever Fill PDA is ontwikkeld voor het optimaliseren van Robot gebruik en ondersteunt gebruikers om het beste uit hun robot te halen.

De software en hardware zijn zo ontwikkeld dat hij bij elke apotheek met een RoboPharma Robot kan worden toegepast.

Met de Clever Fill PDA kunt u nog sneller en efficiënter vullen en nog eenvoudiger de voorraad in uw robot op peil houden.

De handheld computer is handzaam, heeft een 2d scanner en een alarmfunctie. Hij heeft een groot bereik en u heeft 2 handen vrij bij het vullen.



VOORDELEN

- Beduidend sneller vullen van uw robot.
- De PDA kan een alarm geven als kanalen bijna leegraken of in geval van storing.
- U heeft beide handen vrij bij het vullen.
- U kunt 2d barcodes verwerken.

Configuratie

De Clever Fill PDA, hand held oplossing bestaat uit de volgende onderdelen

- Een handzame en robuuste PDA (hand held computer)
- Gecombineerde 1d en 2d scanner, geïntegreerd in de handheld computer
- Touch screen
- Toetsenbord
- Wi-Fi verbinding

Opties

- Heuptas
- Armbevestiging met gecombineerde 1d en 2d vinger scanner. In dit geval wordt de PDA aan uw arm bevestigd en de scanner aan uw vinger. Daardoor heeft u beide handen vrij voor uw werkzaamheden.

Bespaar tijd met vullen


Met de Clever Fill PDA kunt u sneller en efficiënter vullen door op de pda de job "Vullen" te selecteren. Vervolgens scant u de barcode van het product. De PDA vraagt "Geef aantal op" of "Vol" Dan geeft u het aantal op door bijvoorbeeld op "5" te drukken gevolgd door "Enter". De PDA geeft dan de te vullen locaties en aantallen op. De robot laat automatisch de bijbehorende leds knipperen. Tot slot drukt u op "Gereed" en de vulsessie is afgerond

Alarmfunctie

De Clever Fill PDA is voorzien van een alarmfunctie die u kan waarschuwen dat het tijd wordt om bepaalde kanalen aan te vullen of in geval van storing.

Meer informatie?

Bnieuwwd hoe de Clever Fill PDA u kan helpen om tijd te besparen in uw apotheek? Neem dan nu contact op met RoboPharma, tel: +31 (0) 416 34 71 72 of sales@robopharma.com

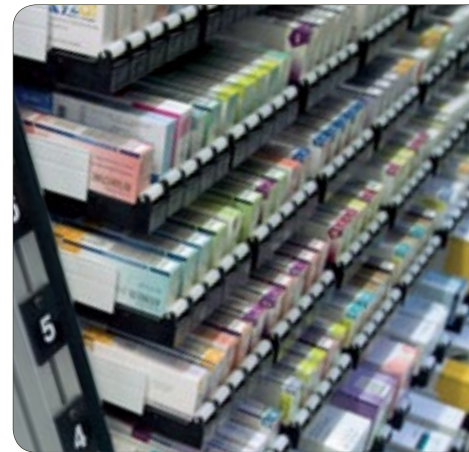

RoboPharma B.V.
 Postbus 653, 5140 AR Waalwijk
 Havenweg 14, 5145 NJ Waalwijk
 The Netherlands
 Tel: +31 (0)416 34 71 72
 Fax: +31 (0)416 65 18 85
www.robopharma.com
info@robopharma.com

**PHARMACY
 AUTOMATION**

